

Bienvenue sur


**moovcare**®

# NOTICE D'UTILISATION DU PATIENT ET DU PROCHE

L'application Moovcare® Toxicité est un dispositif médical. En cas d'urgence, veuillez contacter votre médecin ou le service des urgences.

Version 1.0.1

Publication de la notice: Mai 2026

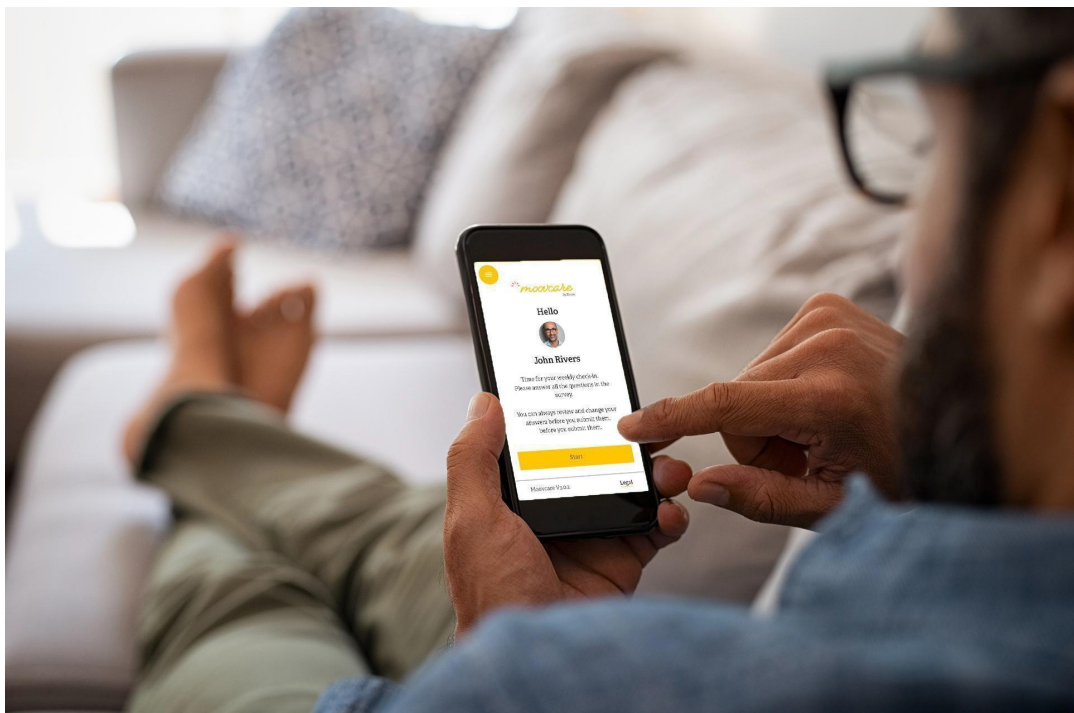

|                                                                                  |              |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
|   | Fabricant:   | SIVAN INNOVATION Ltd.<br>Hatidhar 5<br>4366507 Raanana, Israel           |
| <div data-bbox="39 188 157 225"> <div>EU</div> <div>REP</div> </div>             | Mandataire:  | KAPSIKUM<br>4 rue René Razel<br>91400, Saclay, France                    |
|  | Importateur: | Sivan France<br>163 Quai Aulagnier<br>F-92600 Asnières-sur-Seine, France |

***Merci de lire attentivement cette notice avant d'utiliser  
MOOV CARE® Toxicité.***

- Nous vous conseillons de conserver cette notice au cas où vous auriez besoin de revoir le processus d'utilisation de la web application. Si vous souhaitez accéder aux instructions d'utilisation précédentes ou si vous souhaitez la recevoir sous forme papier, veuillez envoyer votre demande à : **contact@moovcare.com**.
- Pour toute question, conseil ou information, veuillez contacter votre médecin.
- Ce dispositif médical vous a été prescrit personnellement. Ne partagez pas vos codes d'accès avec autrui, même si leurs symptômes ressemblent aux vôtres, car ceci pourrait compromettre le bon fonctionnement de ce dispositif en vue de votre suivi médical.
- Les coordonnées du support technique :  
**support@moovcare.com**: réponse dans les 24 heures.

**Service d'assistance - patients : 09 72 66 22 11** (appel gratuit)

Horaires de l'assistance: Du lundi au vendredi 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (sauf jours fériés)

# Sommaire



|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Principe de fonctionnement.....</b>                                     | <b>4</b>  |
| 1.1 En pratique.....                                                          | 4         |
| 1.2 Les utilisateurs professionnels de santé de Moovcare®.....                | 4         |
| <b>2. Mode d'emploi.....</b>                                                  | <b>5</b>  |
| 2.1 Avant de commencer.....                                                   | 5         |
| 2.2 Descriptif des caractéristiques des patients.....                         | 6         |
| 2.2.1 Inscription pour bénéficier de l'application Moovcare®<br>Toxicité..... | 6         |
| 2.2.2. Votre questionnaire.....                                               | 10        |
| 2.2.3 Comment modifier vos paramètres ?.....                                  | 12        |
| 2.2.4. Voir l'historique des données.....                                     | 13        |
| 2.2.5. Vous souhaitez arrêter le suivi Moovcare® ?.....                       | 14        |
| 2.2.6. Documentation/aide.....                                                | 14        |
| 2.2.7 Demander de l'aide d'un proche ou d'un soignant.....                    | 14        |
| <b>3. Qui pourra bénéficier de Moovcare Toxicité?.....</b>                    | <b>15</b> |
| <b>4. Avertissements.....</b>                                                 | <b>15</b> |
| <b>6. Données à caractère personnel.....</b>                                  | <b>16</b> |
| <b>7. Symboles.....</b>                                                       | <b>17</b> |
| <b>8. Date de fabrication.....</b>                                            | <b>18</b> |
| <b>9. Mentions légales.....</b>                                               | <b>18</b> |


# 1. Principe de fonctionnement

MOOV CARE® Toxicité est un dispositif médical destiné au suivi des patients adultes ayant un cancer métastatique en phase de traitement par chimiothérapie, thérapies ciblées ou et/ou immunothérapie afin de détecter toute toxicité liée aux anticancéreux. Il s'agit d'un logiciel basé sur un algorithme d'analyse de symptômes cliniques. Ces symptômes, pouvant être précurseurs de complication, sont récupérés à l'aide de questionnaires remplis par les patients.

Il permet le suivi actif, individuel et à distance des patients par leur médecin.

## 1.1 En pratique

De façon hebdomadaire, vous recevrez un email avec un lien vers un questionnaire concernant vos symptômes. Vous pouvez remplir ce formulaire sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Si Moovcare® détecte une anomalie, votre équipe de soins sera directement avertie.

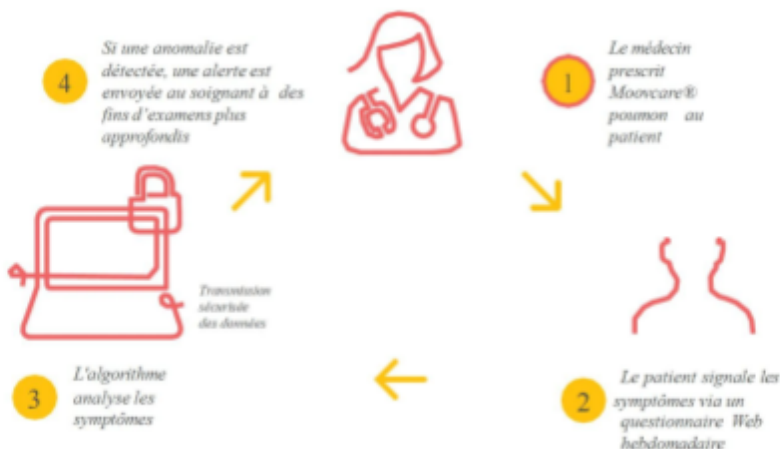

## 1.2 Les utilisateurs professionnels de santé de Moovcare®

### Médecin référent

Le médecin référent est le médecin vous ayant prescrit l'application de suivi Moovcare® Toxicité. Toutes vos réponses sont disponibles sur le tableau de bord Moovcare® Toxicité du médecin afin de surveiller votre état de santé en permanence. Si une anomalie est détectée, une alerte est directement envoyée.

### Les autres médecins du centre de soins

En cas d'absence, le médecin référent pourra désigner un médecin secondaire pour le suivi de vos symptômes.

## **Le personnel médical et les collaborateurs du médecin**

Des membres du personnel désignés par les médecins peuvent accéder à vos données pour faciliter votre suivi.

L'application Moovcare® Toxicité est conçue pour surveiller à distance les toxicités liées aux traitements anticancéreux, afin de détecter précocement toute complication.

## **2. Mode d'emploi**

### *2.1 Avant de commencer*

Moovcare® Toxicité est un dispositif de surveillance médical.

L'application ne remplace pas le diagnostic du médecin mais fonctionne en tant qu'outil digital de soutien pour surveiller à distance les symptômes des patients ayant un cancer métastatique en phase de traitement. Moovcare® vous permettra de renseigner vos symptômes et ceux-ci seront transmis immédiatement au médecin.

**Note** : à la fin de votre questionnaire, vous disposez d'un champ de saisie libre pour vous permettre de donner d'autres informations médicales ou de signaler de nouveaux symptômes.

### **Suivi personnalisé**

Moovcare® permet un suivi personnalisé et une communication permanente avec votre médecin référent via un questionnaire hebdomadaire. C'est ce questionnaire qui est analysé par Moovcare® Toxicité.

### **Aucune installation nécessaire**

Moovcare® Toxicité est une application web ; aucun téléchargement ni aucune installation n'est nécessaire. Un accès à internet et une adresse email sont obligatoires. Nous vous conseillons d'utiliser un compte de messagerie Gmail pour recevoir les e-mails et notifications Moovcare® Toxicité.

Moovcare® Toxicité est compatible avec les versions suivantes des moteurs de recherche:

- Chrome 141
- Firefox 141
- Internet Explorer 11
- Safari 18
- Edge 144

Et également avec les opérateurs suivants :

- ios 26
- Android 16
- Windows 11
- OSX 26

## Sécurité des données

Moovcare® Toxicité utilise le niveau de sécurité le plus élevé afin de garantir la confidentialité de vos données de santé.

Toutes les bases de données rattachées au dispositif respectent la réglementation nationale en matière de protection des données. Les centres de données sont situés en France au sein d'une entreprise certifiée.

## Questionnaire symptômes

A un rythme pré-défini avec l'équipe médicale, vous recevrez par email un lien vers un simple questionnaire pour vous permettre de signaler vos symptômes sur votre téléphone, tablette ou par ordinateur. Vous pouvez également utiliser Moovcare® Toxicité pour signaler des symptômes quand vous le souhaitez.

### Quel genre de questions va-t-on me poser ?

Moovcare® Toxicité vous demandera de signaler les symptômes typiques et d'en indiquer la sévérité le cas échéant. Cela peut être une question dont la réponse est oui/non, ou une évaluation d'un symptôme de mineur à majeur. Votre médecin référent sera averti en cas de détection d'anomalie.

## 2.2 Descriptif des caractéristiques des patients

### 2.2.1 Inscription pour bénéficier de l'application Moovcare® Toxicité

#### Étape 1 : Suivi avec l'application Moovcare®

Moovcare® Toxicité est un dispositif médical classe IIa

#### Étape 2 : Critères d'éligibilité

Afin de déterminer votre éligibilité pour le suivi par Moovcare® Toxicité votre médecin vérifiera que vous remplissez les critères d'éligibilité:

- Vous avez plus de 16 ans.
- Vous êtes en cours de traitement par chimiothérapie, thérapie ciblée et/ou immunothérapie

Note : lors de votre inscription dans le système Moovcare® Toxicité le médecin enregistre vos informations médicales sur votre état actuel.

Vous pouvez choisir un membre de votre famille ou une personne fiable (tel qu'un soignant à domicile) pour vous aider à répondre au questionnaire Moovcare® Toxicité à tout moment. Ce proche n'aura cependant pas directement accès à votre questionnaire.

Si vous le jugez nécessaire, veuillez en informer votre médecin référent.

#### Étape 3 : activer votre compte

Une fois inscrit sur Moovcare® Toxicité par votre médecin référent (ou un membre de l'équipe de soins accrédité), **vous recevrez un email pour activer votre compte.**

- Si vous ne voyez pas d'email dans votre boîte de réception, vérifiez votre boîte « courriers indésirables » ou boîte de Spam. Une fois l'email retrouvé, cochez-le comme
- « légitime » afin que les emails suivants arrivent dans votre boîte de réception.
- Si vous ne trouvez pas l'email d'activation dans votre boîte de courriers indésirables, il est probable que l'adresse électronique saisie lors de votre inscription soit erronée. Merci de contacter le support technique

## Et ensuite?



Vous recevrez un email pour confirmer l'activation de votre compte, intitulé « Bienvenue sur Moovcare® Toxicité. Cet email vous permettra d'accéder à la documentation du système Moovcare® Toxicité et de commencer à remplir votre premier questionnaire

On vous demandera de confirmer votre adresse électronique. Cliquez sur Confirmer pour ouvrir l'application Moovcare® Toxicité on vous demandera ensuite de créer un mot de passe à 12 caractères minimum, chiffres et lettres. Des caractères spéciaux peuvent être utilisés. Une fois que c'est fait, cliquez sur Définir le mot de passe. Votre mot de passe ne peut pas contenir votre nom ou prénom, ni une partie de votre e-mail.

La barre de couleur fonctionne comme ceci:

rouge/ orange: Non valide

Vert:valide

En cas de couleur orange/rouge,la barre de"définir le Mot de Passe" ne s'affichera pas.

**Note :** Votre mot de passe vous sera demandé chaque fois que vous souhaitez vous connecter

8 à l'application. Vous pouvez l'enregistrer sur votre appareil afin que votre navigateur le reconnaisse.

3

Bienvenue !

Veuillez vous identifier

Email

\*\*\*\*\*

d mo

M'identifier

Mot de passe oubli ?

Moovcare V3.9.0-3 A Propos Besoin d'aide ?

4

Consentement Chimioth rapie

En cliquant sur le bouton ci-dessous, je confirme avoir lu le [formulaire de consentement](#), et autorise formellement la collection et l'utilisation de mes donn es de sant  Moovcare® par le m decin surveillant mes sympt mes. Je ne m'oppose pas   l'h bergement de mes donn es de sant  sur un site d'h bergement certifi . Par la pr sente, je donne mon consentement et poursuis mon inscription.

☐ Accepter [Politique de confidentialit ](#)


☐ Je donne mon consentement

Poursuivre

Moovcare V3.9.0-3 A Propos Besoin d'aide ?

L' cran d'identification s'affichera. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur M'identifier.

L' cran de consentement s'ouvrira. Lisez-le attentivement, cela concerne votre accord sur la collecte et l'utilisation de vos donn es de sant  dans Moovcare . Cochez la case Je donne mon consentement puis cliquez sur Poursuivre.

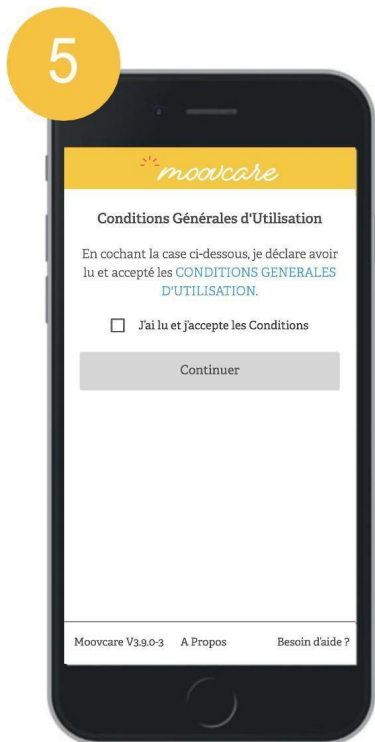


Ensuite les Conditions d'utilisation apparaîtront. Veuillez en prendre connaissance.



Vous recevrez ensuite un SMS sur votre téléphone avec un code afin de vous identifier. Retournez dans l'application Moovcare® et entrez le code d'authentification, puis cliquez sur Confirmer.

**Note :** en cas d'erreur dans votre numéro de téléphone (vous pouvez vérifier celui utilisé pour l'envoi du SMS sur ce même écran), cliquez sur **Changer le numéro de téléphone** pour le corriger et recevoir un nouveau code.

## 2.2.2. Votre questionnaire

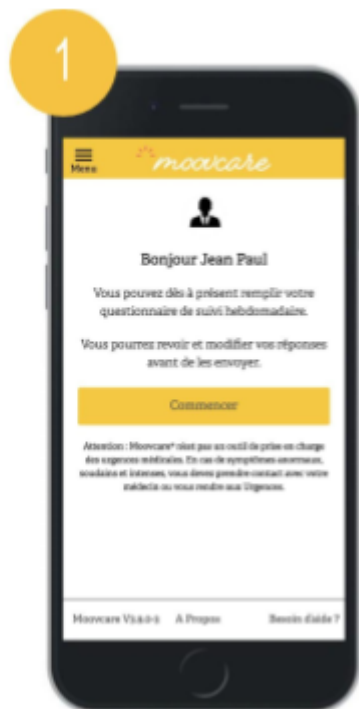

Une fois votre compte activé, vous allez pouvoir cliquer sur Commencer afin de remplir votre premier questionnaire.  
A un rythme prédéfini, vous recevrez ensuite un lien vers votre espace Moovcare®, pour remplir votre questionnaire.

En cliquant sur Commencer, vous serez dirigé vers la première question. On vous demandera de signaler les symptômes caractéristiques que vous pourriez ressentir.



### Note

La dernière question vous donne la possibilité d'accéder à un champ libre. Celui-ci est strictement réservé aux informations médicales telles qu'un changement dans votre état de santé ou de nouveaux symptômes non spécifiés dans le questionnaire. Vérifiez vos réponses, puis cliquez sur Envoyer. Vous ne pourrez plus modifier vos réponses. Après cet écran, vous pouvez fermer la page et vous recevrez peu après un email de confirmation.


Vous pouvez également utiliser le questionnaire Moovcare® pour signaler des symptômes qui apparaîtraient à tout moment entre deux questionnaires, ou bien demander un nouveau questionnaire en utilisant cette adresse : <https://patient.moovcare.com/login/fr>

**Vous avez oublié ou tardé à répondre au questionnaire ? Si vous ne répondez pas au questionnaire, votre équipe médicale en est informée.**

**Cependant, nous vous conseillons de suivre autant que possible les recommandations.**


**Une fois votre questionnaire envoyé, nous vous invitons à vérifier que vous avez bien reçu la confirmation d'envoi par email. Sinon, nous vous recommandons de soumettre un nouveau questionnaire ou d'appeler le support technique Moovcare.**

## 2.2.3 Comment modifier vos paramètres ?

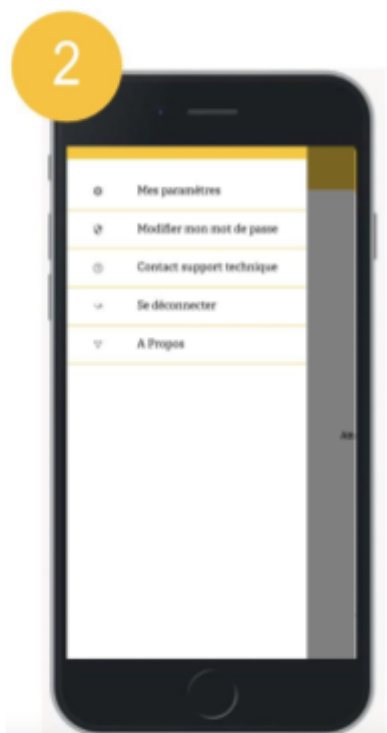

Vous pouvez gérer et modifier directement certaines données vous concernant.  
Sur la page d'accueil, cliquez sur le menu en haut à gauche.

Si vous le souhaitez, vous pourrez modifier votre mot de passe à partir de ce menu.

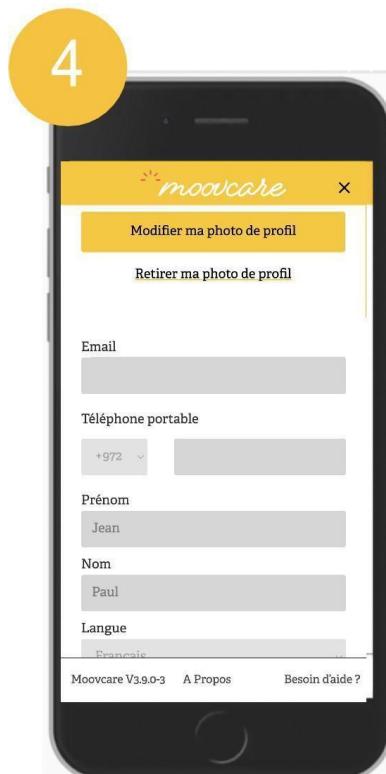

Dans Mes paramètres, vous pouvez changer la langue du questionnaire.

Pour modifier votre mot de passe, veuillez saisir votre nouveau mot de passe à 12 caractères minimum, chiffres et lettres. Des caractères spéciaux peuvent être utilisés. Pour réinitialiser un mot de passe, nous avons besoin d'une double vérification au moyen d'un code envoyé par SMS sur le mobile, à fournir dans l'application afin de permettre le changement de mot de passe.

#### 2.2.4. Voir l'historique des données

Vous disposez du droit d'accès à vos données médicales. Votre médecin référent pourra exporter l'historique de vos questionnaires si nécessaire.

## 2.2.5. Vous souhaitez arrêter le suivi Moovcare® ?

Si vous ne souhaitez plus être suivi par Moovcare®, vous pouvez retirer votre consentement.

Sur la page de Bienvenue, sélectionnez Mes paramètres dans le menu en haut à gauche.


En bas de la liste, vous verrez Retirer mon consentement pour Moovcare® Toxicité.

En cliquant sur cette option, un écran apparaîtra pour confirmer que vous souhaitez arrêter le suivi Moovcare® Toxicité.

Si vous souhaitez de nouveau être suivi par Moovcare®

Toxicité, contactez votre médecin référent. Celui-ci vous enverra un email pour vous permettre de vous reconnecter

grâce à votre adresse email et le même mot de passé utilisé précédemment. Vous devrez alors redonner votre consentement.

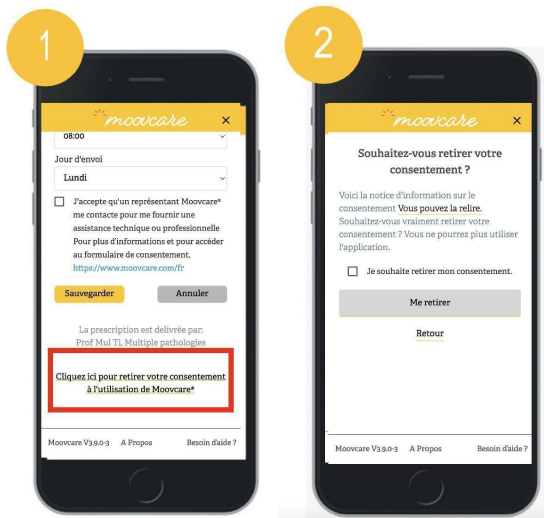

## 2.2.6. Documentation/aide

Dans le pied de page des questionnaires, vous trouverez des informations dont vous aurez peut-être besoin dans le cadre de votre suivi par Moovcare® .



## 2.2.7 Demander de l'aide d'un proche ou d'un soignant

Vous pouvez demander à un proche ou à un soignant de remplir le questionnaire pour vous si nécessaire. Veuillez donner les informations de contact à votre médecin lors de votre inscription.

Le proche n'aura pas accès au questionnaire séparément.

Le consentement à ce qu'un représentant de Moovcare vous contacte dans le cadre d'une assistance technique et professionnelle peut être géré dans la rubrique "Paramètres". Par défaut, ce consentement

n'est pas coché et l'équipe technique n'a pas accès à vos coordonnées. Vous pouvez à tout moment valider ou pas cette option.

### 3. Qui pourra bénéficier de Moovcare

#### Toxicité?

- Les patients âgés de plus de 18 ans.
- Les patients présentant un cancer métastatique en cours de traitement par chimiothérapie, thérapies ciblées et/ou immunothérapie

### 4. Avertissements

- L'efficacité de Moovcare® Toxicité dépend de vos réponses régulières au questionnaire symptômes.
- Si une anomalie est détectée, une alerte sera envoyée à votre médecin référent.
- Si vous n'avez pas répondu au questionnaire, vous recevrez des rappels jusqu'à ce que vous remplissiez le questionnaire.
- Si vous êtes dans l'impossibilité de répondre au questionnaire tout seul, un proche ou un soignant pourra vous aider et soumettre votre questionnaire en indiquant les symptômes que vous signalez.
- Nous recommandons que le proche qui vous assistera à répondre au questionnaire soit à vos côtés afin de vous assurer que les réponses soient exactes.
- Si vous ou votre proche ne pouvez pas répondre au questionnaire, merci de contacter votre médecin référent.
- Moovcare® Toxicité ne remplace pas un diagnostic réalisé par un professionnel de la santé.
- Si vous avez recours à d'autres dispositifs médicaux dans le cadre de votre suivi médical, merci d'informer votre médecin référent avant d'utiliser Moovcare® Toxicité
- Si de nouveaux symptômes apparaissent entre deux questionnaires, remplissez un nouveau questionnaire ou contactez votre médecin référent.
- Si vous ne souhaitez plus utiliser Moovcare® Toxicité, merci d'en informer votre médecin.
- Si vous ne recevez pas vos questionnaires par email, merci de vérifier dans les courriers indésirables ou la boîte de SPAM.
- Si vous rencontrez d'autres difficultés qui ne figurent pas dans cette notice, merci de contacter le service assistance par email au [support@moovcare.com](mailto:support@moovcare.com) pour nous en informer.
- Les utilisateurs sont expressément informés que l'utilisation de Moovcare® Toxicité dans un environnement potentiellement dangereux est associée à des risques de sécurité informatique qui ne peuvent pas être entièrement traités par le fabricant de l'application (ex. si vous enregistrez vos login/mots de passe sur un ordinateur public)
- N'utilisez aucun traducteur automatique à partir de votre navigateur, cela pourrait perturber les formulations. Moovcare® Toxicité prend en charge 4 langues: français, anglais, allemand et espagnol. Si vous souhaitez changer de langue, veuillez le faire via les paramètres de votre compte.
- En cas d'incident grave, contactez immédiatement l'équipe de support par email à [support@moovcare.com](mailto:support@moovcare.com) ainsi que l'autorité compétente du pays dans lequel vous vous trouvez. Il est également recommandé d'informer le mandataire par email à l'adresse suivante : [contact@kapsikum.com](mailto:contact@kapsikum.com)

Un incident grave est défini comme suit : tout incident ayant entraîné directement ou indirectement, susceptible d'avoir entraîné ou susceptible d'entraîner:  
la mort d'un patient, d'un utilisateur ou de toute autre personne; une grave dégradation, temporaire ou permanente, de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou de toute autre personne; une menace grave pour la santé publique

## 6. Données à caractère personnel

L'utilisation de l'application Moovcare® Toxicité nécessite de saisir des données à caractère personnel. Vous devrez renseigner des informations personnelles dont votre adresse email et votre numéro de téléphone portable pour vous identifier numériquement dans Moovcare®. Votre centre de soins dispose d'un accès à ces données administratives afin de faciliter vos échanges. L'utilisation de l'application Moovcare® Toxicité nécessite également que vous consentiez au traitement de vos données de santé. Ces données sont réduites dans Moovcare® Toxicité et sont là pour s'assurer que vous recevez votre questionnaire adapté à votre suivi-postopératoire, sur une durée prédéfinie (environ 30 jours) suite à la date d'opération. Vous allez également communiquer des données sur vos symptômes à chaque fois que vous répondrez au questionnaire.

Ce dispositif est disponible en différentes variantes, selon le pays dans lequel il est utilisé. Un cookie fonctionnel vous permet d'être automatiquement redirigé vers le pays correspondant après votre première connexion avec le même navigateur et le même matériel informatique. Un cookie est un fichier texte que le serveur stocke sur votre appareil. Vos données personnelles collectées dans Moovcare® Toxicité sont conservées et sécurisées auprès d'un hébergeur de données de santé certifié en France. Vous trouverez plus d'informations ci-dessous. L'application Moovcare® Toxicité est un dispositif médical en cours d'investigation et vos données seront archivées selon la réglementation en vigueur.

Les données collectées le sont à des fins d'études, de recherche et de développement ou de statistiques, pour les besoins du fabricant ou de ceux de ses partenaires, ou à la demande des autorités sanitaires nationales ou internationales. Toutes les données seront anonymisées avant toute utilisation.

Le support technique demandera votre consentement avant de répondre à vos questions. Vous devrez également donner votre consentement pour que l'appel téléphonique soit enregistré. Ces données sont enregistrées sur les serveurs sécurisés de notre fournisseur pouvant être hors Europe. Notre fournisseur s'est engagé à assurer un niveau de sécurité comparable à celui exigé en Europe, au travers l'utilisation de règles de contrats contraignantes.

Pour faciliter votre inscription et votre suivi Moovcare® Toxicité, vous avez aussi la possibilité de recourir à l'assistance professionnelle de Moovcare® Toxicité. Vous y avez peut-être consenti lors de votre inscription chez le médecin ou vous pouvez y consentir depuis votre interface. Vous autorisez alors un personnel infirmier chez Sivan à accéder à vos données personnelles (nom, prénom, email, numéro de téléphone, statut dans Moovcare® Toxicité. Vous pouvez retirer votre consentement à ce service dès que vous le souhaitez depuis l'application.

Conformément au règlement EU 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), vous disposez des droits suivants concernant vos données personnelles : droit d'accès, droit de rectification, droit à l'effacement, droit à la limitation du traitement, droit d'opposition au

traitement, droit à la portabilité des données.

Si vous souhaitez exercer l'un de ces droits, merci de contacter le délégué à la protection des données du promoteur. Vous pouvez également contacter le délégué à la protection des données (DPD/DPO en anglais) chez Sivan

à l'adresse électronique suivante : [dpo@sivan-innovation.com](mailto:dpo@sivan-innovation.com), en précisant votre nom, prénom, adresse électronique, le nom de votre centre de soins et la nature de votre demande.

À des fins de portabilité, vous avez la possibilité de demander accès directement à vos données, au format de fichier JSON. Le contenu du fichier n'a pas de format de données requis spécifique. Vos données de support technique sont transférées en Israël, chez le fabricant de l'application. L'Union Européenne reconnaît qu'Israël dispose d'un niveau de sécurité adéquat pour protéger des données personnelles.

Nous nous efforçons de respecter le RGPD afin de garantir la sécurité et vos droits à l'égard de vos données personnelles. Cependant, dans le cas où vous constateriez une violation de cette réglementation, vous avez le droit de porter plainte auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ([www.CNIL.fr](http://www.CNIL.fr)) .

## 7. Symboles

Symboles employés :

|                                                                                    |                                                                           |                                                                                     |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    | Symbole indiquant le fabricant du dispositif médical                      |    | Symbole identifiant un avertissement                           |
|    | Symbole indiquant le numéro de série avec la version du logiciel          |    | Symbole du Dispositif médical                                  |
|  | Symbole indiquant le numéro d'identification unique du dispositif médical |  | Symbole du marquage CE, suivi du numéro de l'organisme notifié |
|  | Symbole indiquant la consultation du manuel utilisateur                   |  | Symbole du représentant autorisé dans l'union européenne       |

|                                                                                  |                                                         |                                                                                   |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   | Adresse du site Internet                                |   | Signale qu'une alerte a été émise |
|  | Signale qu'une photo peut être visualisée (png ou jpeg) |  | Symbole de l'importateur          |

## 8. Date de fabrication

Date de fabrication : voir la section « À propos » en bas des pages du questionnaire. Date de révision : Mai 2026.

Date de publication de la notice Moovcare® Toxicité à partir de Moovcare 1.0.1

## 9. Mentions légales

Moovcare® est un dispositif médical édité par SIVAN INNOVATION Ltd, au capital de 100 000 shekels, dont le siège social est situé au Hatidhar 5, Raanana, Israël, 51-509695-6.

Tél. : +972 2-567-7808 - E-mail : [courrier@sivan-innovation.com](mailto:courrier@sivan-innovation.com)

Directeur de la publication & Responsable éditorial : Mr Daniel Israel, Président

SIVAN Innovation est représenté par son mandataire Kapsikum, dont le siège social est situé au 4 rue René Razel 91400, Saclay, France

Email : [contact@kapsikum.com](mailto:contact@kapsikum.com)

L'application Moovcare® poumon est hébergée par SAS AVENIR TELEMATIQUE - ATE, au capital social de 60 000 €, dont le siège social est situé au 21 Avenue de la Créativité, 59650 Villeneuve d'Ascq, et immatriculée au RCS de Lille MÉTROPOLE sous le numéro 347 607 764.

Tél. : (+33) 9 78 07 20 78 - E-mail : [contact@ate.info](mailto:contact@ate.info)

Représentant légal : Mr Maxence ROUSSEAU, Président

Moovcare® poumon, dispositif médical de classe IIa <https://www.moovcare.com/>



MOOV-TOX\_PATIENT\_IFU\_FRENCH\_05\_26